


collecte des urines, tubes à vide, flacons et récipients avec système d'aspiration intégré

- transfert hygiénique, sans perte d'échantillon et en toute sécurité de l'urine contenue dans le flacon, directement dans le tube à vide

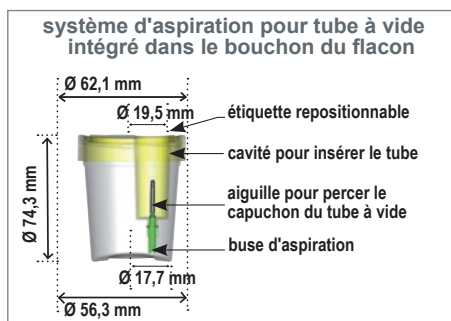

Flacons 120 ml, bouchon avec système d'aspiration intégré

- en polypropylène transparent
- bouchon hermétique en polyéthylène jaune avec joint torique interne et **système d'aspiration intégré**
- graduation jusqu'à 100 ml (sans bouchon)
- surface dépolie pour écrire
- volume max. 120 ml, recommandé 60 ml
- dim. : Ø 53 x h73 mm



Récipients 3 litres de collecte 24h

- forme rectangulaire avec anse
- corps en polypropylène brun opaque
- bouchon en polypropylène blanc standard ou **jaune avec système d'aspiration**, suivant modèle
- joint torique interne pour une étanchéité totale
- étiquette d'identification de l'échantillon
- bande verticale translucide graduée sur le côté



présentation	stérile	référence	Prix HT
en vrac	-	AX408702 les 475	
sachet unitaire	-	AX408726 les 350	
en vrac	radiation	AX408702G les 250	
sachet unitaire	radiation	AX408726G les 350	

référence	Prix HT
AX408610 Récipients de collecte standard 3 litres, les 30	
AX408600 Récipients de collecte, bouchon avec système d'aspiration 3 litres, les 30	

Transfert de l'urine du flacon au tube




1 - Soulever l'étiquette située sur le bouchon



2 - Insérer le tube à vide dans la cavité du bouchon




3 - Percer le capuchon en caoutchouc du tube avec l'aiguille, le tube se remplit

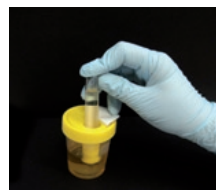

4 - Retirer le tube à vide, répéter l'opération si un autre tube est nécessaire



5 - Remplacer l'étiquette du bouchon

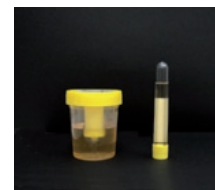

6 - Transfert d'urine effectué sans perte d'échantillon et en toute sécurité