

Désinfectant par voie aérienne

ASEPTANIOS AD

- ▶ **bactéricide, fongicide, virucide, sporicide selon norme NF T 72-281**



- désinfection par voie aérienne des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés
- bactéricide, fongicide, virucide, sporicide selon norme NF T 72-281 (7 ml/m³)
- insérer le bidon dans l'AEROSEPT COMPACT 250, placer l'appareil dans un angle de la pièce, préalablement nettoyée, ajuster la programmation en calculant le volume à traiter, activer l'AEROSEPT COMPACT 250 et quitter la pièce
- la diffusion se déclenche, le temps de diffusion est automatiquement calculé selon le volume affiché, respecter le temps selon l'activité antimicrobienne recherchée

- s'équiper d'un masque de protection pour entrer dans la pièce, ventiler la pièce efficacement (5 renouvellements d'air) avant utilisation
- dispositif médical de classe IIa

composition : solution stabilisée d'acide peracétique (+/- 1200 ppm) et de peroxyde d'hydrogène

Propriétés microbiologiques		temps	réduction
Bactéries	EN 1040, EN 1276, EN 13697	Acinetobacter baumannii (BLSE) Enterobacter cloacae (BLSE) Enterococcus faecium (ERV)	15 min. ≥ 5 log
		Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli	30 min ≥ 6 log
		Enterococcus hirae Klebsiella pneumoniae (BLSE) Staphylococcus aureus (SARM)	
	Mycobactéries EN 14348 EN 13697		
Levures / Moisissures	EN 1275, EN 1650, EN 13697	Candida albicans	15 min. ≥ 6 log
		Aspergillus niger	120 min ≥ 6 log
Virus	EN 14476	Poliovirus	60 min ≥ 4 log
Spores	EN 13704	Bacillus subtilis	120 min ≥ 5 log
		Clostridium difficile	60 min ≥ 4 log

	référence	Prix HT
Bidon de 2 litres Aseptanios AD, l'unité	DA2615	

AÉROSEPT 250 COMPACT

- ▶ **atomiseur autonome, portatif et entièrement automatique**



- appareil de désinfection par voie aérienne
- désinfection des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyés
- aérosolisation par pulsion séquentielle pour une répartition optimale de la solution désinfectante dans la pièce
- utilisation avec le produit de désinfection ASEPTANIOS AD
- aspiration automatique du produit désinfectant
- débit constant du produit garanti par un système original de venturi assisté par pompe péristaltique (7 ml/m³)
- démarrage différé programmable, permet la sortie de l'utilisateur avant démarrage de l'appareil
- programmateur électronique avec affichage digital
- calcul automatique du temps de diffusion à partir du cubage de la salle à traiter
- contrôle automatique de la quantité de produit restant dans le bidon, l'appareil ne démarre que si la quantité est suffisante pour traiter le volume de la pièce souhaité

- remplacement facile du bidon sans risque de projection de produit
- traçabilité informatique par liaison USB (temps de diffusion, temps de contact, remplacement du bidon, éventuels problèmes rencontrés lors de la désinfection), exportation directe des données sur PC sans logiciel, format CSV
- sécurité : arrêt automatique en cas de défaut de fonctionnement
- en option chariot mobile en inox

caractéristiques

- volume max. à traiter : 250 m³
- compresseur à membrane
- capacité : bidon de 2 litres
- débit nominal : 1 l/heure
- traitement de 60m² en moins de 2h
- dim. (l x p x h) : 380 x 235 x 330 mm
- poids 16 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

	référence	Prix HT
Désinfecteur voie aérienne AEROSEPT 250 compact	DA8020	
Chariot pour module désinfectant compact	DA8025	