

Tubes à usage unique pour disperseur pour prélèvements ostéoarticulaires

certification
DM DIV 98/79/CEE



Tubes à usage unique
avec billes inox incorporées,
stériles par rayons gamma,
sous blister individuel.



- broyage de tissus d'origine humaine, animale ou végétale
- biopsies tissulaires
- cartilage, os
- aucun risque de contamination croisée : tubes complets à usage unique
- les tubes DHX88 et DHX89 sont des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV)



Retrouvez nos disperseurs pour tubes
dans ce catalogue, page 996.



Retrouvez la gamme complète
sur notre site internet

www.labomoderne.com


DHX8020




	référence	Prix HT
Tubes stériles avec billes inox, emballage individuel simple, les 25	DHX88	sur devis
Tubes stériles avec billes inox, emballage individuel double, les 25	DHX89	sur devis

Protocoles

Exemple 1 : protocole de préparation de matrice de récurage
sur vis orthopédique, corps étranger, os, etc.

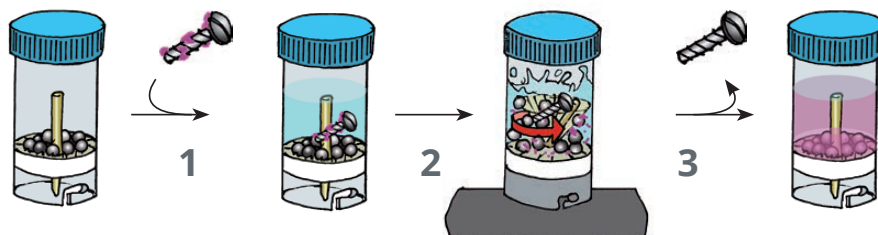

Exemple 2 : protocole de préparation de matrice de broyage
de biopsie, tissu, cartilage, ganglion, etc.

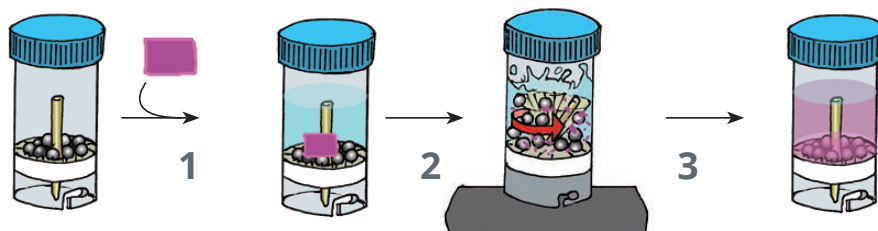

1. **dépôt d'un échantillon** : 1 cm² maximum, dans un tube stérile ouvert en condition stérile, ajout d'un sérum physiologique, TS ou bouillon puis fermeture du tube sous condition stérile

2. **broyage** : broyage sous PSM ou sur paillasse (temps et vitesse de broyage à adapter selon la matrice)

3. **récupération** : prélèvement et étalement sur milieu sélectif puis mise en culture