

Hygiène et désinfection des surfaces et des sols

Performances :

- virucide
- bactéricide
- fongicide

ANIOSURF ND PREMIUM,  
pouvoir nettoyant renforcé



3 parfums : agrumes, citron et fraîcheur

- nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs
- dilution à 0,25% : une dose de 20 ml pour un seau de lavage de 8 litres d'eau
- ne pas rincer les surfaces

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN 1040, EN 1276, EN 13727
- **levuricide** : EN 1275, EN 1650
- **fongicide** : EN 13697, actif sur PRV (virus-modèle de HBV), BVDV (virus-modèle de HCV), Influenza virus A [H1N1], et HIV-1

| référence                      | Prix HT |
|--------------------------------|---------|
| Parfum agrumes                 |         |
| DA1510 Doses 20 ml, les 500    |         |
| DA1514 Bidon 1 litre, l'unité  |         |
| DA1517 Bidon 5 litres, l'unité |         |
| Parfum fraîcheur               |         |
| DA1519 Bidon 5 litres, l'unité |         |
| Pompe pour bidon 5 litres      |         |
| DA1520 Pompe 20 ml, l'unité    |         |



Les performances  
des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier le **spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- le **temps de contact** nécessaire
- la **température** d'utilisation
- les **conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- la **concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

| Spectre                                                     | Phase 1 : normes de base | Phase 2 : normes d'application |                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             |                          | essais en suspension           | essais sur des surfaces               |
| agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | NF EN 1276                     | NF EN 13697                           |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 1650                     | NF EN 13697                           |
| Sporicide                                                   | NF EN 14347              | NF EN 13704                    | -                                     |
| vétérinaire                                                 |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | NF EN 1656                     | NF EN14349 / NF EN16437               |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 1657                     | NF EN16438                            |
| Mycobactéricide                                             | -                        | NF EN 14204                    | -                                     |
| Virucide                                                    | -                        | NF EN 14675                    | -                                     |
| médecine humaine                                            |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | NF EN 13727                    | NF EN 14561 / NF EN 16615             |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 13624                    | NF EN 14562 / NF EN 16615             |
| Mycobactéricide                                             | -                        | NF EN 14348                    | NF EN 14563                           |
| Virucide                                                    | -                        | NF EN 14476                    | -                                     |
| autres domaines                                             |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | -                              | NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791 |

\* fongicide = action contre les levures ET les moisissures

# ANIOSURF ND Premium

ANIOSURF ND Premium FRAICHEUR, CITRON

Détergent désinfectant  
sols et surfaces



- Association originale de principes actifs en synergie
- Déclinaison en 3 parfums
- Compatible avec les matériaux courants en environnement médico-hospitalier
- Optimisation des données écotoxicologiques

## INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).

## CARACTERISTIQUES

- Détergent et désinfectant visant à réduire les risques de formation de biofilm sur les surfaces et assurer la propreté visuelle des surfaces
- Large efficacité anti-microbienne, démontrée y compris sur BMR et BHR
- Formulation non corrosive et compatible avec les surfaces lavables
- Séchage sans trace et sans résidu collant
- Utilisable en eau froide ou en eau tiède
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de GES\* de 4% par rapport à un produit de même application
- Solution limpide de couleur verte
- pH pur 7 +/- 0.5
- pH à 0.25% en eau du réseau = 7,3

\* Gaz à Effets de Serre

**PRODUIT  
A DILUER**  
soit 20 ml > 8 L



# ANIOSURF ND Premium

ANIOSURF ND Premium FRAICHEUR, CITRON

Détergent désinfectant sols et surfaces

## MODE D'EMPLOI



Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. Dilution à 0,25% : Verser une dose de 20 ml d'ANIOSURF ND PREMIUM dans le seau de lavage.



Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.



Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

## COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 5.2 mg/g), excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2) et dispositif médical de classe IIa - usage réservé aux professionnels.

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| Actif sur     | Normes                                                                                        | Temps de contact   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bactéries     | EN 1040, EN 13727<br>Actif sur BMR et BHR selon EN 13727                                      | 15 minutes         |
|               | Actif sur K. pneumoniae OXA 48                                                                | 30 minutes         |
|               | EN 13697                                                                                      | 45 minutes         |
| Mycobactéries | M. terrae : EN 14348                                                                          | 240 minutes / 2%   |
|               | M. terrae : EN 13697                                                                          | 240 minutes / 0.5% |
| Levures       | EN 1275, EN 13624, EN 13697                                                                   | 15 minutes         |
| Moisissures   | EN 13624, EN 13697                                                                            | 90 minutes / 0.5%  |
| Virus         | Selon EN 14476 : PRV virus modèle de HBV, BVDV (virus modèle HCV), Vacciniavirus, Herpesvirus | 5 minutes          |
|               | Selon EN 14476 : Rotavirus                                                                    | 60 minutes / 1%    |

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

## CONDITIONNEMENTS

|                     | 4 bidons, 5 litres<br>+ pompe 20 ml | 12 flacons doseurs<br>de 1 litre | 500 doses<br>de 20 ml |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ANIOSURF ND Premium | 2436.036                            | 2436.092                         | 2436.129              |
| Version Citron      | 2451.036                            | 2451.092                         | -                     |
| Version Fraîcheur   | 2450.036                            | 2450.092                         | 2450.129              |

