

Hygiène des surfaces et instruments

i Spray nettoyant et désinfectant.

Spray Mikrozip® Sensitive désinfection rapide sans alcool

Performances :

- virucide
- bactéricide

- action rapide sur un large spectre de micro-organismes
- sans alcool
- respect des surfaces sensibles à l'alcool : plexiglas, plastiques



- liquide incolore à base d'ammoniums quaternaires
- prêt à l'emploi, utilisation en spray ou sur une lingette
- ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces sensibles
- idéal pour fauteuil d'examen en cuir, les matières synthétiques et plastiques, les plateaux de traitements, les couveuses, l'extérieur des systèmes de dialyse etc.
- compatibles contact alimentaire

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : VAH
- activité **virucide** limitée: norovirus : EN14476, rotavirus

Spray Mikrozip® Universal désinfection rapide 30% d'alcool

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- levuricide

- faible teneur en alcool
- ne laisse pas de trace
- excellente couverture des surfaces
- désinfection de dispositifs médicaux et tout type de surfaces



- prêts à l'emploi, utilisation en spray ou sur une lingette
- très bonne compatibilité avec les matériaux
- rapidement efficace : en 1 min en référence à la norme EN 16615
- dermatologiquement testé
- sans colorant ni parfum
- pour dispositifs médicaux et surfaces nettoyables présentant un risque d'infection élevée et exigeant de courtes durées d'action : surfaces proches des patients, tables d'examen, surfaces d'appareils médicaux, surfaces de travail attenantes aux tables d'opération (claviers, panneaux de commande d'appareils sensibles, etc.)
- principes actifs : isopropanol, éthanol
- compatibles contact alimentaire

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN13727, VAH
- **mycobactéricide** : bacille de la Tuberculose - EN14348
- **levure** : EN13624, VAH
- **virucide** : norovirus, polyomavirus, rotavirus - EN14476

Spray fongicide Mikrozip® AF désinfection 60% d'alcool

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- levuricide
- fongicide

- séchage rapide sans laisser de traces
- matières plastiques et synthétiques : plateaux de traitements, couveuses, systèmes de dialyse, etc.
- action rapide
- bon pouvoir mouillant



- prêts à l'emploi, utilisation en spray ou sur une lingette
- incolore
- biodégradable (OCDE 301D)
- compatibles contact alimentaire
- principes actifs : éthanol, 1-propanol

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN13727, EN16615, NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5, AFNOR NFT 72190-4, BK, SARM
- **fongicide** : EN13624, EN13697, NF EN 1275, AFNOR NFT 72190
- activité **virucide** limitée : EN14476, norovirus, polyomavirus SV 40, rotavirus, adénovirus (Type 5)
- **mycoactéricide** : bacille de la Tuberculose - EN14348
- **levuricide** : EN13727, EN16615

référence	Prix HT
MS1961 Mikrozip® Sensitive 1 litre	
MS1965 Mikrozip® Sensitive 5 litres	

référence	Prix HT
MS1971 Mikrozip® Universal, spray de 1 litre	
MS1975 Mikrozip® Universal, bidon de 5 litres	

référence	Prix HT
MS1902 Mikrozip® AF, 250 ml	
MS1900 Mikrozip® AF, 1 litre	
MS1905 Mikrozip® AF, 5 litres	

Les performances des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier **le spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- **le temps de contact** nécessaire
- **la température** d'utilisation
- **les conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- **la concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

Spectre	Phase 1 : normes de base	Phase 2 : normes d'application	
		essais en suspension	essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1276	NF EN 13697
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1650	NF EN 13697
Sporicide	NF EN 14347	NF EN 13704	-
vétérinaire			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1656	NF EN14349 / NF EN16437
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1657	NF EN16438
Mycobactéricide	-	NF EN 14204	-
Virucide	-	NF EN 14675	-
médecine humaine			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 13727	NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 13624	NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide	-	NF EN 14348	NF EN 14563
Virucide	-	NF EN 14476	-
autres domaines			
Bactéricide	NF EN 1040	-	NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791

* fongicide = action contre les levures ET les moisissures