

Écouvillons stériles en tube plastique avec milieu de transport spécial virus (VTM)

VTM conçu suivant les prescriptions de
l'annexe 8 du CDS_EPR_ARO_2006_1.
Voir document ci-après.



Conservation des micro-organismes
entre le prélèvement et le
laboratoire d'analyse.

Kit comprenant :
un tube avec le milieu de transport,
un écouvillon sécable,
un sac Biohazard


- kits prêts à l'emploi, faciles à utiliser, évitent les contaminations croisées
- **tube** conique à jupe, pré-étiqueté, avec large zone de marquage, capuchon à vis parfaitement hermétique, avec stries pour une utilisation avec des gants
- **écouvillon** en sachet stérile, tige Ø 2,2 x 150 mm avec point de rupture et tête en viscose Ø 5 mm
- **sachet** Biohazard pour échantillons à risque biologique
- tubes 5 ou 10 ml, 2 volumes de remplissage du milieu de transport spécial virus, pour s'adapter aux différentes applications :
 - 1 ml pour éviter l'effet de dilution,
 - 3 ml pour plusieurs tests sur le même échantillon
- après le prélèvement, l'écouvillon est cassé au niveau de la rupture, et l'extrémité restante est insérée dans le tube de transport, lui-même placé dans le sachet Biohazard

**Milieu spécial virus
(VTM = Virus Transport Media)**


- milieu liquide
- conçu pour les prélèvements nasaux, du nasopharynx, des yeux, de la peau ou des muqueuses
- apte à la conservation de **virus** : *Papilloma*, *Herpès Virus Porcin type 1 (HPV1)*, *influenza aviaire (H7N1)*, *Influenza A (H1N1)* ou *H1N1 2009 pandémique*, *Virus Herpès*, *Coronavirus*, *Hfmd*, etc.




milieu de culture	tube de transport			écouvillon		référence	Prix HT
	capacité	dim.	capuchon	tige	extrémité		
3 ml SPÉCIAL VIRUS	10 ml	Ø 16 x 87 mm	blanc	Polystyrène	viscose	LMR191003B	les 50
1 ml SPÉCIAL VIRUS	5 ml	Ø 16 x 58 mm	blanc	Polystyrène	viscose	LMR190501B	les 50
3 ml SPÉCIAL VIRUS	5 ml	Ø 16 x 58 mm	blanc	Polystyrène	viscose	LMR190503B	les 50

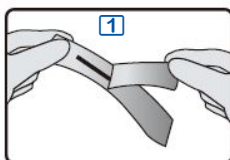


1 Retirer l'écouvillon du sachet

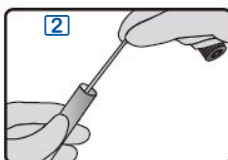


2 Après le prélèvement, décharger l'écouvillon dans le milieu de transport

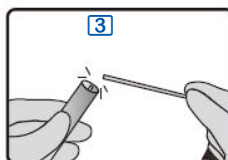


3 Casser l'écouvillon dans le tube au niveau du point de rupture

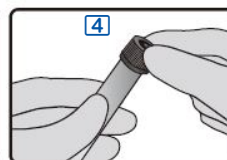

4 Revisser le tube au maximum

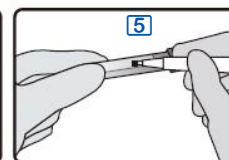

5 Marquer l'échantillon

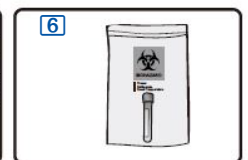

6 Mettre le tube dans un sachet Biohazard

prescriptions de l'annexe 8 du CDS_EPR_ARO_2006_1

PHASES 1-3

Phases 1-3

CONTINUITÉ DE LA FOURNITURE DES SOINS DE SANTÉ

Mesures OMS	Mesures nationales
• Fournir des indications sur la lutte contre l'infection, la sécurité biologique au laboratoire et la prise en charge clinique dans les services médico-sociaux et les établissements de soins. • Mettre en place un réseau consultatif clinique régional pour collecter et diffuser en temps utile des informations cliniques importantes, recenser les lacunes dans les connaissances et élaborer des protocoles cliniques normalisés. • Aider les autorités nationales de dispensation des soins de santé à identifier les besoins et les stratégies d'action prioritaires et à évaluer la préparation (par exemple en dressant les listes de contrôle, des plans de préparation modèle à la pandémie, et en organisant une formation et des exercices sur table). • Elaborer des recommandations à l'intention des communautés reculées, disposant de peu de ressources ou pour les soins à domicile des malades au cours d'une pandémie de grippe.	• Recenser les priorités et les stratégies d'action des systèmes de soins de santé publics et privés concernant le tri des malades, les moyens supplémentaires mobilisables et la gestion des ressources humaines et matérielles. • Examiner et mettre à jour les stratégies visant à assurer la continuité des soins de santé à l'échelle nationale et infranationale. • Elaborer des stratégies, des plans et une formation pour permettre à tous les agents de soins de santé, y compris les agents communautaires, de faire face à des flambées animales ou à une pandémie. • Mettre au point des protocoles et des algorithmes de dépistage, de traitement et de prise en charge des cas. • Formuler des recommandations nationales de lutte contre l'infection.⁴⁸ • Estimer les besoins et prévoir l'achat et la distribution d'un matériel de protection individuelle pour le personnel.⁴⁹ • Elaborer et mettre en œuvre des stratégies et méthodes systématiques de sécurité biologique au laboratoire, de manipulation et d'expédition des échantillons en toute sécurité. • Explorer les modalités permettant de fournir gratuitement (ou avec une couverture d'assurance) les médicaments et les soins médicaux afin d'encourager la notification et le traitement rapide des cas de grippe humaine due à un virus grippal animal ou à un virus potentiellement pandémique. • Développer les moyens d'action voulus pour distribuer rapidement les tests diagnostiques une fois qu'ils seront disponibles. • Evaluer la capacité du système de santé à détecter et à endiguer les flambées de grippe humaine en milieu hospitalier.

48. Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins. Recommandations provisoires de l'OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007 (WHO/CDS/EPR/2007.6).

49. Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des soins. Recommandations provisoires de l'OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007 (WHO/CDS/EPR/2007.6).

50. Collecting, preserving and shipping specimens for the diagnosis of avian influenza A (H5N1) virus infection, Guide for field operations. Organisation mondiale de la Santé, 2006 (WHO/CDS/EPR/ARO/2006.1).